

# Érintés nélküli infravörös lázmérő

V030101

## Hogyan kell használni:

### Hőmérsékleti egységek beállítása

Kikapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a Mérőgombot 5 másodpercig. Amikor a képernyőn megjelenik a °C (vagy °F), röviden nyomja meg a Mérőgombot a Celsius-fok (°C) és a Fahrenheit-fok (°F) közötti váltáshoz.

### Váltás testmód és tárgymód között

Bekapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a Mérőgombot 5 másodpercig, hogy válthasson a tárgymód és a testmód között.

### Hőmérséklet mérése

- Nyomja meg a Mérőgombot a készülék bekapcsolásához.
- Igazítsa az érzékelő szondát a homlok (vagy tárgy) középpontjához, 3-5 cm távolságra, majd nyomja meg a Mérőgombot a hőmérséklet méréséhez.
- Amikor egy rövid sípoló hangot hall, a mérés befejeződött, és az eredmény leolvasható.

## Elemcsere


Ha a képernyőn az elem szimbóluma üresen jelenik meg, az azt jelzi, hogy az elemeket ki kell cserélni.

## Műszaki adatok

- **Modell:** IR-FMO1
- **Hőmérséklet-érzékelő:** Infravörös érzékelő
- **Kijelző:** Digitális LED
- **Tápfeszültség:** DC 3.0V (2 db AAA elem)
- **Mérési hely:** Homlok
- **Mérési távolság:** 3–5 cm
- **Mérési tartomány:**
  - Testmód: 32,0 °C – 42,9 °C (89,6 °F – 109,4 °F)
  - Tárgymód: 0 °C – 80 °C (32 °F – 176 °F)
- **Pontosság:**
  - ±0,2 °C: 35,0 °C – 42,0 °C
  - ±0,3 °C: 32,0 °C – 34,9 °C, 42,1 °C – 42,9 °C
  - ±0,4 °F: 95,0 °F – 107,6 °F
  - ±0,5 °F: 89,6 °F – 94,8 °F, 107,8 °F – 109,4 °F
- **Ismételhetőség:** ≤0,2 °C (0,4 °F)
- **Mérési idő:** 1 másodperc
- **Automatikus kikapcsolás:** 8 másodperc tétlenség után
- **Ház anyaga:** ABS műanyag
- **Üzemi környezet:**
  - Hőmérséklet: 15–40 °C
  - Relatív páratartalom: 15%–95%
- **Szállítási/tárolási feltételek:**
  - Hőmérséklet: -20–55 °C
  - Relatív páratartalom: 15%–95%
  - Légköri nyomás: 70 kPa – 106 kPa
- **Súly:** 39 g (elem nélkül)
- **Méret (HxSxM):** 122 x 29 x 23 mm
- **Várható élettartam:** 5 év

## Alkatrészek leírása:

- 1.Mérógomb
- 2.Kijelző
- 3.Infravörös érzékelő
- 4.Elemfedél

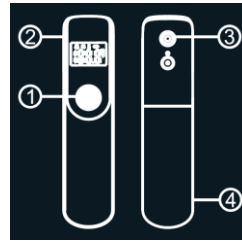


## Kijelző:

## Tárgymód

## Figyelmeztetés Elem állapota

Testmód

Mért érték

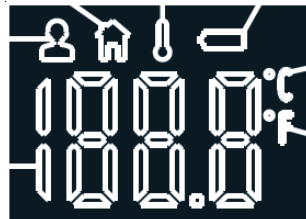

Celsius

Fahrenheit


## Elem telepítése és cseréje

### Telepítés/Csere lépései:

1. Fordítsa meg az infravörös hőmérőt, és tolja az elemfedelet a nyíl irányába.
2. Helyezzen be/cseréljen ki 2 db AAA (3,0 V) elemet az elemházban található polaritásjelölések alapján.
3. Az elem behelyezése/cseréje után csúsztassa vissza az elemfedelet a helyére.

### Kép utasítások:

- A megfelelő helyre mutató nyilak segítenek az elemház megnyitásában és bezárásában.

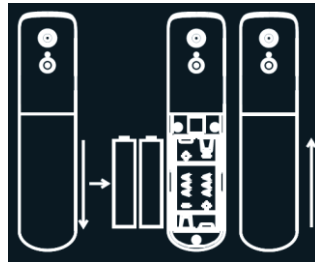

### Gyártó:

Shenzhen Medek Bio-Medical Co., Ltd.

No. 4, 2nd Industrial Zone, Gushu, Xixiang, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China, 518126

### EC REP:

Shanghai International Holding Corporation GmbH (Europe)

Eiffestraße 74, 20537 Hamburg, Németország

