

Mellszívó használati útmutató

JSL-X901

Ez az automata mellszívó egyedi kialakításának köszönhetően lehetővé teszi a kényelmesebb fejési pozíció megtartását. A puha masszázspárna kellemes és meleg érzetet biztosít, utánozni tudja a baba szopómozgását, így az anyatej halkabban, finoman és gyorsan áramlik.

A pumpa kompakt, könnyen összeszerelhető. Minden alkatrésze biztonságosan tisztítható mosogatógépben. A pumpa **nem tartalmaz biszfenol-A-t**.

A szoptatási szakértők szerint az anyatej a legjobb tápanyagforrás az egyéves kor alatti csecsemők számára. A születéstől számított hat hónap után a baba tovább szoptatható, és fokozatosan kiegészítő táplálék is adható. Az anyatej különösen a baba igényeihez igazodik, mivel olyan antitesteket tartalmaz, amelyek megvédik a fertőzésektől és allergiáktól.

A mellszívó segíthet a szoptatási időszak meghosszabbításában. Le tudja fejni és eltárolni az anyatejet, így akkor is biztosíthatja a baba számára, ha Ön éppen nem tud szoptatni. A pumpa kompakt és diszkrét működésű, ezért bárhová magával viheti, így bármikor lefejeheti az anyatejet gyermekének.

TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS

- Első használat előtt tisztítsa meg és fertőtlenítsa a mellszívót.
- Minden használat után tisztítsa meg az összes alkatrészt.
- A pumpát teljesen szedje szét, beleértve a kacsacsőr-szelepet is.

Fontos:

- A kacsacsőr-szelep eltávolításakor legyen óvatos.
- Ha megsérül, a pumpa nem fog működni megfelelően.
- A szelep eltávolításához fogja meg a kisebbik oldalát, és óvatosan húzza ki.

Tisztítás:

- Az alkatrészeket forró vízben kevés mosogatószerrel mossa el, majd alaposan öblítse le.
- A kacsacsőr-szelepet tiszta vízben, kevés tisztítószerrel dörzsölje át, **ne** helyezzen tárgyat a szelepbe.
- Fertőtlenítéshez speciális sterilizáló edényt használjon, vagy forralja 5 percig.

Anyatej tárolása

- A fejés után azonnal zárja le a tárolózsákokat, és tegye hűtőbe vagy fagyasztóba.
- Hűtőszekrényben: **48 óra**
- Fagyasztóban: **3 hónap**

Melegítés

- Felolvasztás után anyatejet tejmelegítővel vagy meleg vízben melegítsen.
- Ne használjon mikrohullámot vagy forrásban lévő vizet, mert tápanyagvesztést okozhat.
- A melegített anyatej etetésre alkalmas.

Figyelmeztetések

1. Ha fagyasztja az anyatejet, az edényt csak **3/4-ig** töltsse meg, hogy maradjon hely a tágulásnak. Ne tárolja az ajtóban.
2. A tápanyagok megőrzése érdekében az előző este tegye hűtőbe a fagyasztott tejet, majd 37 °C alatti meleg vízben melegítse.
3. Finoman rázza fel, hogy a zsír elkeveredjen.
4. Soha ne melegítse mikrohullámban vagy forró vízben → tápanyagvesztést és égési sérülést okozhat.
5. A felolvasztott anyatejet nem szabad újrafagyasztani, kérjük, ne keverjen friss anyatejet felolvasztott tejjel.

FIGYELMEZTETÉS

Ez a termék személyes használatra szolgál, ne ossza meg másokkal, hogy ne veszélyeztesse az egészséget. Legyen óvatos az alkatrészek eltávolításakor vagy csatlakoztatásakor, ne használjon túlzott erőt. A terméket ne tegye ki erős napsütésnek, és tartsa gyermekektől elzárva.

Ne feledje: a fő egységet szigorúan tilos vízben mosni!

Garanciajegy

Köszönjük, hogy termékeinket választotta. Az Ön jogainak védelme érdekében kérjük, őrizze meg a garanciajegyet.

Név _____

Telefonszám _____

Termék neve _____

Termék típusa _____

Vásárlás dátuma _____

Cím _____


Megjegyzés

1. Normál felhasználóknál, ha a fogantyúk, szívórudak és más alkatrészek a vásárlás dátumától számított 1 éven belül megsérülnek, a hibás darab újra cserélhető.
2. Ha a vásárlás után más részek sérülnek, azokat külön kell megvásárolni a forgalmazó üzletekből.
3. Egyéb kellékek és tartozékok nem tartoznak a garancia körébe.
4. Ingyenes cserealkatrész igényléséhez mutassa be a garanciajegyet és a vásárlási bizonylatot.

Nem garanciális esetek

1. Gondatlan, helytelen vagy emberi rongálás okozta kár.
2. Garanciajegy elvesztése vagy megsérülése.
3. Természeti katasztrófák (elháríthatatlan külső ok) által okozott kár.



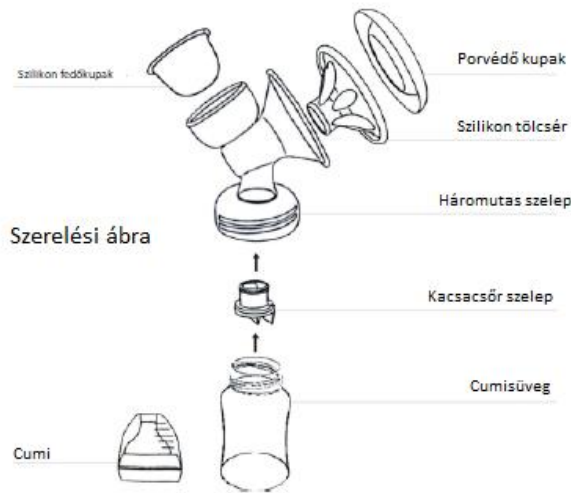

Első használat előtt

Az első használat előtt tisztítsa meg és fertőtlenítsen az összes alkatrészt a „Tisztítás és fertőtlenítés” fejezetben leírtak szerint. Használat előtt mindig fertőtlenítsen az alkatrészeket.

Pumpa összeszerelése

Figyelem: Sterilizálja a mellpumpa minden alkatrészét, és alaposan mosson kezet, mielőtt a tiszta alkatrészekhez nyúl. Ügyeljen arra, hogy a fertőtlenített alkatrészek még forrók lehetnek.

Tipp: A pumpa összeszerelése könnyebb lehet, ha az alkatrészek kissé nedvesek.

Gyakori problémák és megoldások

- **Nincs szívóerő:** Ellenőrizze, hogy a pumpa helyesen van-e összeszerelve, és hogy a szilikon betétek megfelelően illeszkednek-e, így biztosítva a légmentes zárást.
- **Nem sikerül tejet kinyerni:** Próbálkozzon többször, közben lazítson. Ha szükséges, olvassa el a „Sikeres fejés tippjei” részt.

- **Mellfájdalom fejés közben:** Ne alkalmazzon túl nagy szívóerőt. Masszírozza mellét gyengéden (pl. masszázsolajjal), majd váltson kímélőbb üzemmódra. Panasz esetén forduljon egészségügyi szakemberhez.

Összeszerelés lépései

1. Helyezze a masszázspárnát a tölcserbe, nyomja be, és győződjön meg róla, hogy tökéletesen illeszkedik.
2. Nyomja meg a párna szirmait, hogy eltávolítsa a levegőt.
3. Csatlakoztassa a motorhoz a hálózati adaptert.

Mikor érdemes fejni?

- Általában 2–4 héttel a szülés után, amikor a tejtermelés beáll.
- Ha kórházi körülmények között kell etetni a babát.
- Ha mellfeszülés vagy fájdalom jelentkezik: fejjen ki egy kis tejet szoptatás előtt vagy két etetés között.
- Ha a mellbimbó fájdalmas vagy kisebesedett: csak a gyógyulás után fejjen.
- Ha átmenetileg külön van a babától: rendszeresen fejjen a tejtermelés fenntartása érdekében.
- Válassza ki a nap legalkalmasabb idejét, pl. reggel, amikor a tej a leggazdagabb.

Tipp: A baba fényképe, a meleg környezet, fürdés utáni fejés, vagy meleg törölköző a mellre segíti a tejleadást.

Használati módok

- **Masszázs mód:** 9 fokozat
- **Stimulációs mód:** 9 fokozat
- **Fejő mód:** 9 fokozat
(A kijelző mindig mutatja az aktuális fokozatot.)

A készülék alapértelmezetten 30 perc után automatikusan kikapcsol.

Használat menete

1. Mosson alaposan kezet, tisztítsa meg a mellét, üljön kényelmes helyzetbe, és legyen kéznél víz.
2. Illessze a tölcser úgy, hogy a mell középen legyen, és a masszázspárna légmentesen zárjon.
3. Kapcsolja be a készüléket – alpból stimulációs módban indul. A „+/-” gombbal állíthatja az erősséget. Amikor megindul a tej, váltson fejő módra, és válassza a legkényelmesebb szívóerőt.
4. Fejés után kapcsolja ki a készüléket, vegye le a pumpát.
5. Csavarja le a palackot, és készítse elő etetéshez vagy tároláshoz.
6. A többi alkatrészt tisztítsa meg a „Tisztítás és fertőtlenítés” fejezet szerint.

Gyártó: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd, No.8 Tongxing Road Economic & Technological Development area 226010 Nantong, Jiangsu, Kína, dulh@lordmed.com

EC REP: Little Doctor Europe Sp.zo.o., St. Zawila 57G 30-390 Kraków, Lengyelország, serwis@littledoctor.pl

Importőr: CARBON WEB Kft., 5600 Békéscsaba, Balassa u. 16, carbonmedoffice@gmail.com