

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Manuális Kórházi Ágy

Modell: LH-MSF-01

Használati útmutató

Gyártó: Hengshui Loho Medical Equipment Co., Ltd

Megfelelőség: CE, ISO 13485

Dátum: 2025. május



Tartalomjegyzék

1. Biztonsági figyelmeztetések és óvintézkedések
2. Termékáttekintés és alkatrészek
3. Használati utasítások
4. Tisztítás és karbantartás
5. Hibaelhárítás
6. Műszaki adatok
7. Jótállás és ügyfélszolgálat

1. Biztonsági figyelmeztetések és óvintézkedések

VESZÉLY

- **Maximális terhelhetőség:** 200 kg. Ennek túllépése szerkezeti meghibásodáshoz vezethet.
- **Környezeti feltételek:**
 - Használat: 5°C – 40°C közötti hőmérsékleten.
 - Tartsa távol gyúlékony gázoktól vagy oxigéndús környezettől.
- **Betegek biztonsága:**
 - Ne hagyjon felügyelet nélkül gyermekeket vagy zavart állapotú betegeket.

- Ne helyezzen végtagokat mozgó alkatrészek (pl. illesztések) közelébe.

2. Termékáttekintés és alkatrészek

Főbb alkatrészek:

- **Ágykeret:** Rozsdaálló bevonatú, megerősített acél.
- **Állítható részek:**
 - Háttámla: 0°–70° dönthetőség.
- **Kézi vezérlés:** A háttámla emelése kurblival történik.
- **Matrac**

3. Használati utasítások

Pozíciók beállítása

- **Háttámla:** Emelhető a kurbli tekerésével.

4. Tisztítás és karbantartás

Napi tisztítás:

- Törölje le a felületeket nedves ruhával és enyhe tisztítószerrel.
- A nem fémes részeket fertőtlenítse 70%-os izopropil-alkohollal.

Havi karbantartás:

- Ellenőrizze a csavarokat és csatlakozásokat.
- Kenje be a mozgó alkatrészeket szilikon spray-vel.

5. Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
Egyenetlen mozgás	Szennyeződés az illesztéseknél	Tisztítsa meg, kenje meg
Hangos működés	Lazuló alkatrészek	Húzza meg a csavarokat, keresse fel a szervizt

6. Műszaki adatok

- **Méreték:** 205 × 92 × 48 cm
 - **Maximális terhelhetőség:** 200 kg
-

7. Jótállás és ügyfélszolgálat

Jótállás: 1 év az ágykeretre

Gyártói ügyfélszolgálat:

- Ingyenes szám: +86 15369852756
- E-mail: info@lehomedical.com
- Weboldal: www.lehomedical.com
- Hengshui Leho Medical Equipment Co., Ltd.
- Jianshe West Street, Jizhou District, Hengshui, Hebei, Kína

Importőr:

- Carbon Web Kft.
- 5600 Békéscsaba, Balassa utca 16.
- www.carbonmedical.hu
- carbonmedoffice@gmail.com
- +36 30 074 7110