

INHALÁTOR (PORLASZTÓ)

Használati utasítás

Típus: SY308 (Univerzális)

Verzió:A.1

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés.....	1
2. Első fejezet – Termék bevezető.....	1
3. Második fejezet – Működés.....	3
4. Harmadik fejezet – Tisztítás és fertőtlenítés.....	6
5. Negyedik fejezet – Tárolás és karbantartás.....	7
6. Ötödik fejezet – Óvintézkedések.....	8
7. Hatodik fejezet – Elektromágneses kompatibilitás.....	9
8. Hetedik fejezet – Hibaelhárítás.....	9
9. Nyolcadik fejezet – Jelek és szimbólumok.....	10

Bevezetés

Köszönjük, hogy termékünket választotta!

A termék megfelelő használata érdekében, kérjük, alaposan olvassa el a használati kezelési útmutatót! Tartsa a használati kezelési útmutatót könnyen elérhető helyen!

(Minőségbiztosítás)

A fő egységre 1 év garanciát biztosítunk, a gyógyszertartályra 3 hónapot. A garanciális időszak alatt a kártól függően döntünk a karbantartásról vagy a sérült alkatrészek cseréjéről. A tartozékok fogyóeszközök, nem tartoznak a garanciális körbe.

A garancia nem terjed ki a következőkre:

- (1) Helytelen használat, hanyagság, baleset vagy szállítás által okozott meghibásodások.
- (2) A készülék módosítása vagy javítása.
- (3) A sorozatszám vagy az eszköz címkéjének módosítása vagy eltávolítása.
- (4) Eszköz leejtése, főegység elázása, egyéb nedvesség által okozott károk, illetve az utasítások be nem tartása miatt okozott károk.

Ha bármilyen probléma merül fel a használat, karbantartás során, kérjük, forduljon a helyi forgalmazóhoz.

1 Termék bevezető

1. Termékleírás


A hordozható MESH inhalátorban lévő áramkör gyors oszcillációja meghajtja a piezo elektromos kerámia átalakító chipet, amely rezgésre készíti a mikro fém MESH hálót. A folyadék áthalad ezen a rezgésben lévő hálón, mely által apró részecskékre porlasztódik. Ezek a részecskék a szívómaszkon vagy fúvókán keresztül a beteg légzőszervébe jutnak, ezáltal elérve az

inhalációs terápia célját. A folyadék részecskékké atomizálódik, melyet a páciens belélegez. A gyógyszer a nyálkahártyán keresztül közvetlenül adszorbeálódhat a páciens szájába, torkába, légcsőjébe, hörgőibe, tüdőhólyagocskákhoz stb. a kezelés céljának elérése érdekében.


2. Tartozékok




Fő egység

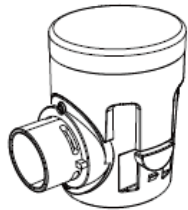

Gyógyszertartály

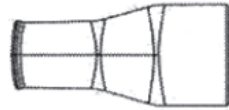


Szájcsutora

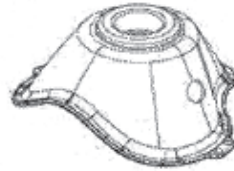

Felnőtt arcmaszka



Gyerek arcmaszka

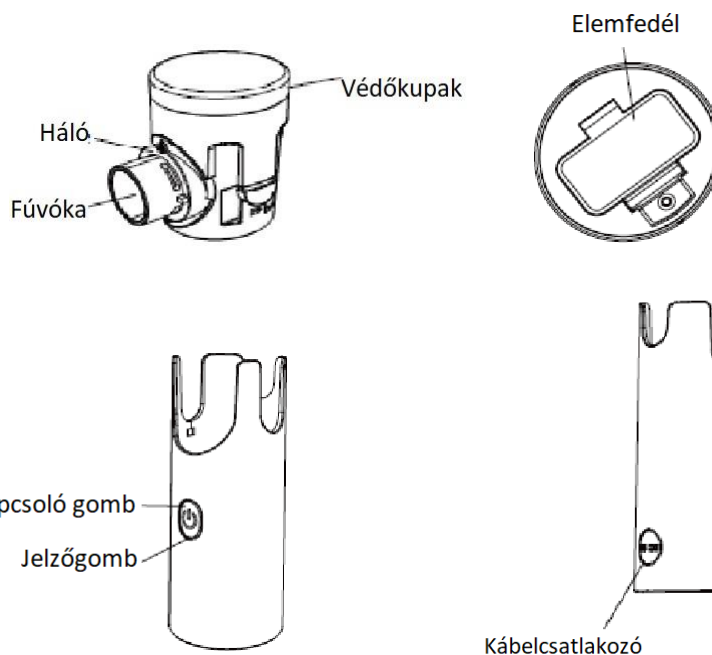

3. Elérhető tartomány

A porlasztó légúti betegségek kezelésére és légúti fertőzések megelőzésére szolgál. Széles körben alkalmazzák a légzőrendszer betegségeinek, például megfázás, hörghurut, asztma, tüdőgyulladás, atípusos tüdőgyulladás és allergia gyógyítására. Foglalkozási betegségek gyógyítására is használható; segít a torokápolásban a művészeknek, fül-orr-gégészeti betegségeket, például krónikus allergiás rhinitist, heveny gégegyulladást, heveny torokgyulladást, akut mandulagyulladást stb. is gyógyít. A porlasztót arcmaszkkal kell használni, az arcmaszka csatlakozócsővének átmérője 20,0+0,1 mm, így az arcmaszka szorosan csatlakoztatható a porlasztóhoz.

4. Alkalmazható személyek köre

A porlasztót felnőttek, idősek, csecsemők és gyermekek használhatják felnőtt felügyelete mellett. A porlasztó otthoni környezetben használható, és megfelel az IEC 60601-1-11 követelményeinek. Ellenjavallatok:

- 1) A készülék alvás közben nem használható.
- 2) Csecsemőknél és gyermekeknél kizárólag felnőtt felügyelete mellett használható.
- 3) A készülék nem használható Pentamidine gyógyszerekkel.
- 4) Tüdőödémás betegek számára tilos a készülék használata!

5) Tilos a készülék használata akut asztma és akut tüdő infarktus esetén!

5. Teljesítményjellemzők

Kiszerezés: 1 db/doboz

Tartozékok: 1 db gyermek maszk, 1 db felnőtt maszk, 1 db szájcsetora, 1 db gyógyszeradagoló

Max. porlasztási teljesítmény: 0,2 ml/perc

Részecske méret: $5 \mu\text{m} \pm 25\%$

Gyógyszer kapacitás: 8ml maximum, 0.5ml minimum

Típus: MESH-membrános

Üzemidő/töltés: ~90 perc

Zajszint: <50dB


Töltés: USB-töltő

Súly: 85g

Méret: 45x55x120mm

Elemek: 2 db AA elem

A köd részecskék ekvivalens részecskeméret-eloszlási görbéje az alábbi:

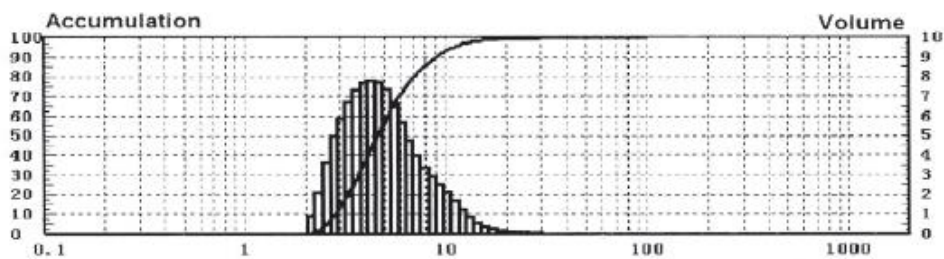

Megjegyzés: a vízszintes tengely a részecskeméret értéke, az érték logaritmus eloszlás; A bal oldali függőleges tengely a térfogat kumulatív százaléka, amely megfelel a görbe növekvő trendjének; A jobb oldali függőleges tengely egy adott szakasz térfogatának százaléka, amely megfelel a hisztogramnak vagy hullámnak. A maximális és minimális ajánlott töltési térfogat $0,5\text{--}8 \text{ cm}^3$.

2 Működés

A keresztfertőzés elkerülése érdekében a porlasztót csak egy személy használja! Kérjük, tisztítsa meg és fertőtlenítse a porlasztót, amikor először használja az eszközt, illetve használat előtt és után is, majd alaposan szárítsa meg! Lásd 3. fejezet.

1.Csatlakoztassa a tápegységet


A porlasztó AA alkáli elemekkel vagy 3,7 V (+- 20%) feszültségű lítium akkumulátorral (opcionális tartozékok) működik.

1, Elemek behelyezése

(1) Nyissa fel az elemek fedelét

(2) Helyezze be az elemeket (2 db alkáli AA elem)

(3) Csukja be az elemtartó fedelét

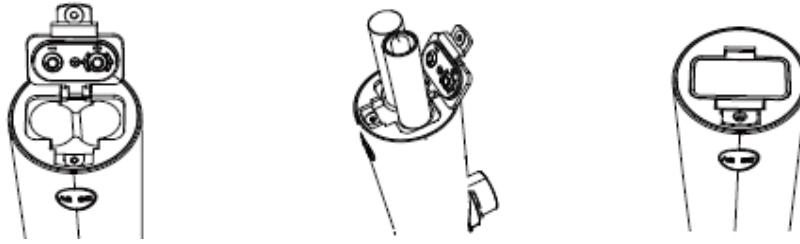

MEGJEGYZÉS:

- (1) Helyezze be az elemeket a polaritásnak megfelelő irányba.
- (2) Ne használjon különböző gyártmányú elemeket.
- (3) Vegye ki az elemeket, ha nem használja a készüléket.

2, Adapter használata

- (1) Dugja be a töltőkábelt az eszközbe.
- (2) Dugja a kábelt a konnektorba egy USB-s mobiltöltő segítségével.

MEGJEGYZÉS: A biztonságos használat érdekében olyan mobil töltőt használjon, amely megfelel a GB 9706.1-2007 vagy az IEC 60601-1 elektromos biztonsági szabványoknak.

3) Mobiltöltő technikai paraméterei: Bemeneti feszültség: AC 100~240V, 50/60 Hz


4) Kimeneti feszültség: 3~5VDC, 1~2A

3, Lítium akkumulátor (opcionális)

- (1) Ha a porlasztó lítium akkumulátorral rendelkezik, az eszköz névleges feszültsége 3,7 V.
- (2) Ha a lítium akkumulátor feszültsége kisebb, mint 3,3 +- 0,1 V, a piros jelzőfény világítani kezd, majd automatikusan leáll, ha a feszültség kisebb, mint 3,0 +- 0,1 V. Ezután töltsse fel a lítium akkumulátort, használja a hálózati adaptert az eszköz és a konnektor összekapcsolásához.
- (3) A piros fény villog töltés közben, ha a lítium akkumulátor feltöltődött, akkor a piros jelzőfény kialszik.

2. A porlasztó egység

- (1) Kérjük, használat előtt tisztítsa meg és fertőtlenítsen a porlasztót, majd alaposan szárítsa meg. (Lásd a 3. fejezetben részletesen)
- (2) Egyik kezével tartsa a főegységet, a másikkal a gyógyszer tartályt. Nyomja a nyílásba, amíg "kattanás" hangot nem hall.

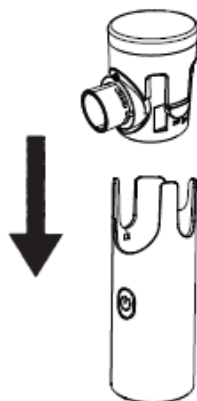

MEGJEGYZÉS:

- (1) Ha nem a megfelelő helyre helyezi a gyógyszer tartályt, az elektróda nem tud elfordulni, és a porlasztó nem fog működni.
- (2) Tartsa tisztán a főegységet és a gyógyszer tartályt (Lásd 3. fejezet), különben a porlasztó nem fog tudni megfelelően működni.

3. Adjon hozzá folyékony gyógyszert

- (1) Az egyik kezével tartsa a főegységet, a másik kezével a gyógyszer tartály fedelét az óramutató járásával megegyező irányba forgatva nyissa ki a fedelet.
- (2) Öntsön folyékony gyógyszert a gyógyszer tartályba.
- (3) Forgassa el a gyógyszer tartály fedelét az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy bezárja a fedelet.



1. Nyissa ki a fedelet, adja hozzá a folyékony gyógyszert.

2. Csukja be a fedelet


MEGJEGYZÉS:

- (1) Javaslat: Max. gyógyszerfolyadék 8 ml, min. 0,5 ml.
- (2) A folyékony gyógyszer behelyezése után ne rázza vagy fordítsa meg az eszközt, mert az a folyadék kiszivárgásához vezet.
- (3) Tartsa a folyékony gyógyszer és a Mesh háló mindig érintkezzen, hogy ne érje levegő a hálólemez.

4. Porlasztó használata

A porlasztó tartozékok közé tartozik a szájcsontra, a felnőtt maszk és a gyermekmaszk. Ha a torkot kell kezelni, használja a csutorát, azonban ha orrüreg/vagy torok kezelésre van szükség, válasszon maszkot.

1. Csatlakoztassa a csutorát vagy a maszkot a főegységhez az alábbi képek szerint:

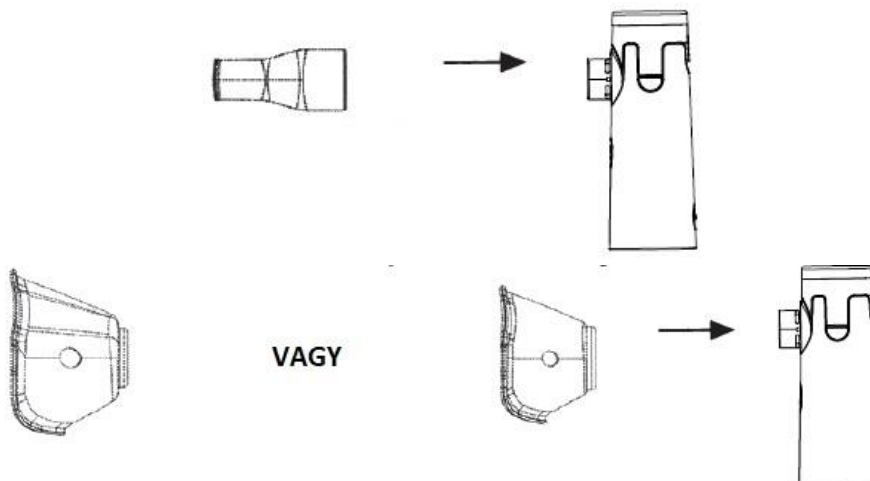

A maszk összeszerelése

- 2, Nyomja meg a START/STOP gombot, ekkor a bekapcsolásjelző lámpa (kék fény) kigyullad.
- 3, Maradjon nyugodt, lazítson és üljön kényelmesen, miközben a kezével fogja a porlasztót, vegyen mély és lassú lélegzetet a hatékonyabb kezelés érdekében.

(1) A csutora használatakor helyezze a szájrész lapos végét a szájba, az ajkakat enyhén zárva, hogy a gyógyszer az érintett területre koncentrálódjon.

(2) A maszk használatakor a maszkot helyezze közel az archoz, hogy minél jobban elfedje az orrüregét és a száját:

Kezelés az orrüregen át: mély belégzés az orrüregből, kilégzés a szájból.

Kezelése torkon keresztül: szájon keresztül történő belégzés, orrüregből kilégzés.

A kezelés során mind a két opció használható.

MEGJEGYZÉS:

(1) Tegyen 0,9%-os fiziológiás sóoldatot a tartályba, összeszerelés után és használat előtt nyomja meg a START/STOP gombot a teszteléshez, ha nem működik megfelelően (6. fejezet).

(2) Kérjük, kövesse az előbbi ábrákat a tartozékok (csutora vagy a maszk) összeszereléséhez.

(3) Kérjük, használja a szájcutorát megfelelően, ne permetezze a folyadékot a nyelvére.

(4) Ne nyeljen le folyadékot, és ügyeljen arra, hogy a folyadék ne kerüljön közvetlenül az érintett területre.

(5) A helytelen és a nem egyenletes légzés a légutak elzáródását okozhatja.

(6) 20 perces inhalálás után az jelzőgomb (sárgán) folyamatosan villogni kezd, és automatikusan kikapcsol az eszköz. Ha a tartály nincs feltöltve folyékony gyógyszerrel, a porlasztó nem fog működni.

(7) Enyhén döntse meg a főegységet maga felé, hogy a hálót mindig érje a folyékony gyógyszer.

MEGJEGYZÉS: Ha a hálót nem éri folyadék, a készülék nem fog működni 10 másodpercig.

(8) Amikor a gyógyszer kevés, döntse maga felé a készüléket (a START/STOP gomb oldalt), úgy hogy a folyadék ellepje a hálót, így teljes mértékben fel tudja használni a maradék gyógyszert.

(9) A készüléket ne használja kiürülve, mert az a mesh háló meghibásodásához vezet.

(10) Ha a jelzőfény (pirosan) lassan villog, az elemek lemerültek, kérjük, cserélje ki új elemekre, amilyen gyorsan csak lehet.

(11) Használat közben ne rázza, mozgassa erősen a készüléket, ellenkező esetben a készülék automatikusan kikapcsol.

(12) A tiszta víz nem alkalmas a készülék használatára, a készülék így nem kapcsol be.

5. Kapcsolja ki az eszközt

1. Nyomja meg a START/STOP gombot a kikapcsolásához, a jelzőfény (kék fény) kialszik.

2. Ha töltőn használja, a készülék használata után húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.

6. Használat után

1. Távolítsa el a csutorát vagy a maszkot.

2. Tartsa az egyik kezével a főegységet, és nyomja meg a gyógyszertartály két oldalán lévő gombokat egyszerre, majd húzza felfelé a tartályt az eltávolításhoz.

3. Nyissa ki a fedelet, öntse ki az összes maradék folyékony gyógyszert, és azonnal tisztítsa meg a készüléket, hagyja az alkatrészeket levegőn megszáradni, és tárolja a készüléket tiszta környezetben.

3 Tisztítás és fertőtlenítés

Kérjük, fertőtlenítse a gyógyszertartályt, a csutorát, a fedőt és a maszkot használat után.

A fertőtlenítés technikai irányelve, a tisztítás és fertőtlenítés speciális módszere a következő:

1. Kapcsolja ki a készüléket mielőtt a tisztítást elkezdené:

- a. Kérjük, tisztítsa meg a tartozékokat; a gyógyszer tartályt, a szájszűrőt, a fúvókát és az arcmaszkot. Szerelje le őket a készülékről, és egy tárolóban tisztítsa meg őket tiszta vízben (40°C-nál hidegebb) körülbelül 5 percen keresztül.
- b. Használjon orvosi gézt vagy puha, tiszta rongyot az alkatrészek megtörléséhez.
- c. Törölje át a fő egységet. Törölje le, ha talál rászáradt gyógyszert, és hagyja a készüléket megszáradni.
- d. A szennyezés elkerülése érdekében tartsa a készüléket és tartozékait száraz jól szellőző helyiségben.

MEGJEGYZÉS:

- Semmiképpen ne tisztítsa a főegységet vízben, a főegységbe ne jusson be víz!
- Használjon orvosi gézt az alkatrészek megszáritásához, mindig tartsa a főegységet és a tartozékokat tiszta száraz helyen!

Fertőtlenítés

Kérjük, fertőtlenítse a gyógyszer tartályt, a szájszűrőt, a fúvókát, a védőkupakot és a maszkot használat után.

1. Tisztítsa meg vagy fertőtlenítse a gyógyszer tartályt, a fúvókát, a védőkupakot és a maszkot (maximum 40°C-os tisztított vízben vagy orvosi fertőtlenítőben).
2. Áztassa a gyógyszer tartályt, a szájszűrőt, a védőkupakot és a maszkot maximum 40°C-os tisztított vízben vagy orvosi fertőtlenítőben körülbelül 30 percig, majd mossa meg az összes tartozékot egyenként langyos vízben (40°C alatt). Adjon a vízhez valamilyen nem toxikus tisztítószerrel!
3. A tartozékok megszáritásához használjon orvosi gézt!
4. Törölje át és fertőtlenítse a maszk és szájszűrő felületét 75% orvosi alkohollal, és szárítsa meg őket levegőn!

MEGJEGYZÉS:

- Semmiképpen ne tisztítsa a főegységet vízben, a főegységbe ne jusson be víz!
- Mindig tartsa a főegységet és a tartozékokat tiszta száraz helyen!

4 Tárolás és karbantartás

1. Inhalátor tárolása

1.1 Tárolási feltételek:

- a.) Környezeti hőmérséklet: -20°C ~ 50°C
- b.) Relatív páratartalom: 0% RH ~ 80% RH nem kondenzáló állapot
- c.) Atmoszférius nyomás: 70,0 kPa ~ 106,0 kPa
- d.) Egyéb: nem korrodáló gázok, jó szellőzés, kerülje a magas hőmérsékletet és páratartalmat, és a direkt napfényt.

1.2 Tárolási instrukciók:

- a.) A készülék szavatossága 3 év a fent említett tárolási feltételek mellett.
- b.) A készüléket és alkatrészeit azonnal tisztítsa meg és fertőtlenítse használat után. A tartozékokat tárolja a termék dobozában azután, hogy teljesen megszáradt. Tárolja a megfelelő tárolási környezetben behatásmentesen.

Érvényesség: A készüléknek kb. 3 év és 4000 alkalom az üzemideje. Elemekkel a készülék napi 30 perces üzemelés esetén kb. 8 napig használható, ezt követően elemet kell cserélni vagy akkumulátor töltést kell biztosítani. A lítium akkumulátor megközelítőleg 60 percig üzemel, és megfelel az EN62133:2013 szabványnak.

2. Inhalátor karbantartása

2.1 Normál működési környezet

- a.) Hőmérséklet: 10°C ~ 40 °C

- b.) Relatív páratartalom: 0% RH ~ 80 % RH nem kondenzáló állapot
- c.) Atmoszférikus nyomás: 86,0 kPa ~ 106,0 kPa
- d.) Energiaforrás: DC 3V+-10% (2 AA elem) vagy beépített lítium akkumulátor 3.7V+-20%.

2.2 Karbantartási instrukciók

- a.) Használja az inhalátort normál feltételek között.
- b.) Ne használja a készüléket nyílt láng, vagy fűtőtest közelében. Az inhalátor és a tartozékok megszáritásához ne használjon, mikrohullámú sütőt, sütőt, ventilátort vagy egyéb szárítóeszközt.
- c.) Ne tegye ki a készüléket vagy tartozékait maró gázoknak vagy folyadékoknak.
- d.) Ne tekerje a vezetéket a készülék köré.
- e.) Ha az inhalátor működése során hibát észlel, keresse a megoldást a Hibaelhárítás fejezetben. Ha az inhalátor továbbra sem működik megfelelően, forduljon a forgalmazóhoz.

5 Óvintézkedések

1. Biztonsági információk

1. Ne használja és ne tárolja a készüléket párás helyen, például fürdőszobában. A készüléket üzemi hőmérsékleten és megfelelő páratartalom mellett használja.
2. A készülék használata előtt olvassa el a használati útmutatóban található összes információt.
3. A használati útmutatóban említett tartozékok kizárólag a készülékhez tartoznak.
4. Ne tegye ki a készüléket vagy annak alkatrészeit erős ütéseknek, például ne ejtse le a padlóra.
5. Ne rázza meg a készüléket használat közben.
6. Ne szerelje szét és ne próbálja megjavítani a készüléket vagy az alkatrészeket.
7. Vegye ki az összes elemet, ha a készüléket nem használja.
8. Amikor a töltőt használja, és feltöltődött az eszköz, akkor húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
9. Ne működtesse a készüléket, és ne érintse meg a töltő aljzatát vagy a tápkapcsolót nedves kézzel!
10. Ne merítse a főegységet vízbe vagy más folyadékba, ne fröccsenjen víz vagy más folyadék a főegységre vagy a hálózati adapterre! Kapcsolja ki a készüléket, és azonnal törölje szárazra egy tiszta ruhával.
11. A készülék károsodásának elkerülése érdekében ne vigye magával és ne hagyja a gyógyszer tartályt gyógyszerrel vagy desztillált vízzel töltve.
12. Ne használja a készüléket újratölthető elemekkel. A készüléket, az alkatrészeket és az opcionális tartozékokat a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően selejtezze le. A jogellenes ártalmatlanítás környezetszennyezést okozhat!
13. Ez a készülék kizárólag emberi használatra engedélyezett!

2. A készülék üzemben tartása

1. Ne használja a gyógyszer tartályt észterrel, zsírral vagy szuszpendált részecskékkel, beleértve a gyógynövény kivonatokat is. Javasoljuk a gyógyszerporlasztó használatát az orvos tanácsainak megfelelően.
2. A készülék minden alkalommal 10-20 percig végezi a porlasztást, a gyógyszer mennyisége 2-4 ml, de az orvos javaslata szerint tovább is használható.
3. Az eszköz egy egyszemélyes orvosi berendezés, ne ossza meg másokkal a használatát.
4. Ne érintse meg a mesh hálót a kezével vagy más tárggyal.

5. A készüléket tartsa távol a csecsemőktől és gyermekektől!

7. Javasoljuk, hogy az elektromágneses interferencia elkerülése érdekében az eszközt legalább 3,3 méter távolságra tartsa a 2 W feletti fogyasztású elektromos termékektől. Pacemaker esetén konzultáljon kezelőorvosával!

FIGYELMEZTETÉS: A készülék nem használható Pentamidine gyógyszerekkel!

6 Elektromágneses kompatibilitás

Irányelv és a gyártói nyilatkozat - elektromágneses kisugárzás		
A készüléket a lent specifikált környezetben való használatra tervezték. A vásárlónak, illetve a készülék használojának meg kell győződnie róla, hogy ilyen környezetben használja.		
Kisugárzás teszt	Megfelelőség	Elektromágneses környezet - irányelv
RF kisugárzás CISPR 11	1. csoport	A készülék csak belső funkciókra használ RF energiát. Ezért az RF kibocsátása nagyon alacsony, így valószínűleg nem okoz interferenciát más közelben lévő elektromos készülékekkel.
RF kisugárzás CISPR 11	B osztály	A készülék alkalmas bármilyen létesítményben való használatra, beleértve a háztartásokat, illetve azokat a létesítményeket, melyet a lakosság részére tervezett elektromos hálózattal láttak el.
Harmonikus kisugárzás IEC 61000-3-2	Nem elérhető	
Feszültség ingadozások IEC61000-3-3	Nem elérhető	

7 Hibaelhárítás

1. A készülék nem működik:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék fel van-e töltve. Ha nem akkor töltse fel a készüléket.
2. Ellenőrizze, hogy van-e elegendő mennyiségű gyógyszer a tartályban.

2. Gyenge a porlasztás:

1. Ellenőrizze, hogy megfelelő gyógyszerrel lette feltöltve a gyógyszer tartály, amely lehet vizes oldat vagy nem korrodáló gyógyszer.
2. Ellenőrizze, hogy elegendő gyógyszer van a gyógyszer tartályban.
3. Billentse meg a készüléket, hogy a gyógyszer a mesh háló teljes felületével érintkezzen.
4. A mesh háló eltömődött. 3-6 ml vízbe cseppentsen 2-3 csepp fehérrecetet, ezt tegye a gyógyszer tartályba, majd porlassza el teljesen. Ezután mossa el és fertőtlenítse a gyógyszer tartályt.

3. Milyen gyógyszer a legalkalmasabb porlasztásra?

1. Mindig kövesse az orvosi utasítás.
2. Csak az orvos tudja megmondani, hogy a betegnek mi a megfelelő gyógyszer a kezelésében.
3. Ne használjon ragacosabb gyógyszert.

4. Gyógyszermaradék

Normális jelenség, ha a készülékből furcsa zajt hall, vagy a készülék leáll a kevés gyógyszer miatt, ez esetben kérjük, hagyja abba az inhalálást.

5. Speciális használat gyerekeknél és csecsemőknél

1. Használjon babymaszkot, ami fedí a szájat és az orrot, a jobb hatás érdekében.

2. Használjon gyerekmaszkot, ami fedí a szájat és az orrot, a jobb hatás érdekében.














Megjegyzés: Gyerekek és csecsemők, csak felnőtt felügyelete és irányítása alatt használhatják a készüléket. Ha nem használják a készüléket, tartsák azt távol a gyerekektől.

6. Minden használónak saját tartozékot kell használni

A tartozékokból minden felhasználónak legyen sajátja úgymint: arcmaszk, szájsutóra.

Amennyiben az eszköz továbbra sem működik, lépjen kapcsolatba a helyi forgalmazóval!

8 Szimbólumok

	CE jelölés		Szériaszám
	Elektronikai és elektromos hulladék szelektív gyűjtése		Gyártás időpontja
	Kövesse a használati kezelési útmutatóban foglaltakat.		Gyártó
	BF típusú alkalmazásrészt		Európai képviselő
	Megjegyzés		Töltöttség jelző
	Időjelző		Alacsony töltöttség jelző
IP22	Vízállósági szint		Környezetbarát

Gyártó:

LITTLE DOCTOR ELECTRONIC (NANTONG) CO. LTD.

No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, KÍNA

EC REP:

LITTLE DOCTOR EUROPE Sp. z o.o.

Zawiła 57G, 30-390 Kraków, Lengyelország

Megfelelőségi tanúsítvány

Model: SY308

Ellenőr: _____



Dátum: _____

Ezt a terméket megvizsgálták, megfelel a meghatározott minőségi előírásoknak, és elhagyhatja a gyárat.