

Midazolám	>100.000	Thebaine	16.666
Nitrazepam	25.000	MOR 100 rokon vegyületek	
Norklórdiazepoxid	250	Morfin	100
Nordiazepam	500	Kodein	100
Prazepam	>100.000	Diacetilmorfin (Heroin)	100
Temazepam	63	Etilmorfin	100
Triazolám	5.000	Hidromorfon	500
BZO 200 rokon vegyületek		Hidrokodein	500
Oxazepam	200	6-Monoacetilmorfin	100
Alprazolám	83	Morfin-3-β-d-glükuronid	2.000
Bromazepam	417	Oxikodon	20.000
Klórdiazepoxid	1.667	Oximorfon	20.000
Klobazám	42	Prometazin	>100.000
Klonazepam	1.667	Rifampicin	8.400
Klorazepát	2.220	Thebaine	8.400
Desalkflurazepam	167	Trimipramin	20.000
Diazepam	167	MPD 1000 rokon vegyületek	
Esztazolám	3.333	Metifenidát	1000
Fentanil	>100.000	MPD 300 rokon vegyületek	
Flunitrazepam	250	Metifenidát	300
Flurazepam	>100.000	MQL 300 rokon vegyületek	
Lorazepam	833	Metakvalon	300
Lormetazepam	833	Amitriptilin	50.000
Medazepam	>100.000	Karbamazepin	20.000
Midazolám	>100.000	Nortriptilin	50.000
Nitrazepam	16.667	Fenitoin	40.000
Norklórdiazepoxid	167	Teofilin	40.000
Nordiazepam	333	MTD 300 rokon vegyületek	
Prazepam	>100.000	Metadon	300
Temazepam	42	(-)-alfa-metadol	2.000
Triazolám	3.333	MTD 200 rokon vegyületek	
BZO 100 rokon vegyületek		Metadon	200
Oxazepam	100	(-)-alfa-metadol	1.500
Alprazolám	42	Doxilamin	3.500
Bromazepam	208	LAAM HCl	6.500
Klórdiazepoxid	833	Alfa Methadol	1.500
Klobazám	21	EMDP	>100.000
Klonazepam	833	EDDP	>100.000
Klorazepát	1.110	OPI 2000 rokon vegyületek	
Desalkflurazepam	83	Morfin	2.000
Diazepam	83	Acetilkodein	1.563
Esztazolám	1.667	Buprenorfin	25.000
Fentanil	>100.000	Kodein	2.000
Flunitrazepam	125	Diacetilmorfin (Heroin)	5.000
Flurazepam	>100.000	Dihidrokodein	1.563
Lorazepam	417	Etilmorfin	250
Lormetazepam	417	Hidromorfon	25.000
Medazepam	>100.000	Hidrokodein	50.000
Midazolám	>100.000	Merperidin	>100.000
Nitrazepam	8.333	6-Monoacetilmorfin (6-MAM)	4.000
Norklórdiazepoxid	83	Morfin-3-β-d-glükuronid	12.500
Nordiazepam	167	Nalorfin-hidroklorid	>100.000
Prazepam	>100.000	Oxikodon	>100.000
Temazepam	21	Oximorfon	>100.000
Triazolám	1.667	Rifampicin	>100.000
COC 300 rokon vegyületek		Thebaine	50.000
Benzoilekgonin	300	OPI 1000 rokon vegyületek	
Kokain	1.000	Morfin	1.000
Ekgonin	100.000	Acetilkodein	1.000
Ekgonin metilszter	>100.000	Buprenorfin	>10000
COC 200 rokon vegyületek		Kodein	1.000
Benzoilekgonin	200	Diacetilmorfin (Heroin)	3.000
Kokain	125	Dihidrokodein	1.000
Ekgonin	5.000	Etilmorfin	200
Ekgonin metilszter	>100.000	Hidromorfon	25.000
COC 150 rokon vegyületek		Hidrokodein	50.000
Benzoilekgonin	150	Merperidin	>100.000
Kokain	125	6-Monoacetilmorfin (6-MAM)	3.000
Ekgonin	10.000	Morfin-3-β-d-glükuronid	10.000
Ekgonin metilszter	>10.000	Nalorfin-hidroklorid	>100.000
COC 100 rokon vegyületek		Oxikodon	>100.000
Benzoilekgonin	100	Oximorfon	>100.000
COT 600 rokon vegyületek		Rifampicin	>100.000
(-)-Kotinín	600	Thebaine	50.000

COT 300 rokon vegyületek		OXY 300 rokon vegyületek	
(-)-Kotinín	300	Oxikodon	300
(-)-Nikotin	9.375	Hidrokodein	75.000
COT 200 rokon vegyületek		Hidromorfon	>100.000
(-)-Kotinín	200	Naloxon	>100.000
(-)-Nikotin	6.250	Oximorfon	750
EDDP 300 rokon vegyületek		OXY 100 rokon vegyületek	
EDDP	300	Oxikodon	100
Petidin	>100.000	Hidrokodein	6.250
Metadon	>100.000	Hidromorfon	50.000
Norfentanil	>100.000	Naloxon	50.000
Fenciklidin	>100.000	Oximorfon	250
Promazine	80.000	PCP 25 rokon vegyületek	
Prometazin	75.000	Fenciklidin	25
Protipendil	80.000	Hidrokodein	>100.000
Prozine	37.500	Hidromorfon	>100.000
EDDP 100 rokon vegyületek		4-hidroxi-fenciklidin	75
EDDP	100	PPX 300 rokon vegyületek	
Petidin	>100.000	D-propoxifén	300
Metadon	>100.000	D-Norpropoxifén	5.000
Norfentanil	>100.000	TCA 1000 rokon vegyületek	
Fenciklidin	>100.000	Nortriptilin HCl	1.000
Promazine	50.000	Amitriptilin	1.500
Prometazin	25.000	Klomipramin	>100.000
Protipendil	50.000	Ciklobenzaprin	12.500
Prozine	12.500	Desipramin	188
ETG 500 rokon vegyületek		Doxepin	2.000
Etil-glükuronid	500	Imipramin	2.500
Etanol	>100.000	Maprotilin	750
D-glükuronsav	>100.000	Nordoxepin	500
Morfin-3-D-glükuronid	>100.000	Opipramol	1.563
FYL 20 rokon vegyületek		Promazine	1.000
Fentanil és fentanil metabolitok	20	Prometazin	6.250
Fentanil	200	Protipendil	25.000
Norfentanil	>10.000	Protriptilin	6.250
FYL 10 rokon vegyületek		Prozine	1.250
Fentanil és fentanil metabolitok	10	Trimipramin	>100.000
Fentanil	100	THC 300 rokon vegyületek	
Norfentanil	>10.000	11-nor-Δ9-THC-9-COOH	300
HMO 250 rokon vegyületek		11-nor-Δ8-THC-9-COOH	300
Hidromorfon	250	Δ8-tetrahidrokannabinol	>50.000
Acetilkodein	4.000	Δ9-tetrahidrokannabinol	>50.000
Buprenorfin	>10.000	Kannabinol	>100.000
Kodein	3.000	THC 200 rokon vegyületek	
Diacetil-morfin	3.000	11-nor-Δ9-THC-9-COOH	200
Dihidrokodein	4.000	THC 150 rokon vegyületek	
Etilmorfin	4.000	11-nor-Δ9-THC-9-COOH	150
Hidrokodein	300	11-nor-Δ8-THC-9-COOH	90
Morfin	2.500	Δ8-tetrahidrokannabinol	45.000
6-Monoacetilmorfin	3.000	Δ9-tetrahidrokannabinol	45.000
Morfin-3-glükuronid	2.500	Kannabinol	60.000
Nalorfin	12.500	THC 50 rokon vegyületek	
Thebaine	>20.000	11-nor-Δ9-THC-9-COOH	50
Metadon	>100.000	11-nor-Δ8-THC-9-COOH	50
Oxazepam	>100.000	11-hidroxi-Δ9-tetrahidrokannabinol	50
Oxikodon	100.000	Δ8-tetrahidrokannabinol	15.000
EDDP	>100.000	Δ9-tetrahidrokannabinol	15.000
K2 50 rokon vegyületek		Kannabinol	20.000
JWH-018-5-Pentánsav	50	Cannabidiol	>100.000
JWH-073-4-Butánsav	50	THC 25 rokon vegyületek	
KET 1000 rokon vegyületek		11-nor-Δ9-THC-9-COOH	25
Ketamin	1.000	11-nor-Δ8-THC-9-COOH	15
Norketamin	1.000	Δ8-tetrahidrokannabinol	7.500
Dextrometorfán	>100.000	Δ9-tetrahidrokannabinol	7.500
Dextrorfán-tartarát	>100.000	Kannabinol	10.000
D-Norpropoxifén	31.250	TML 300 rokon vegyületek	
EDDP	>100.000	Tramadol	300
Petidin	12.500	TML 100 rokon vegyületek	
Mefentermin-hemisulfát só	50.000	Tramadol	100
Metadon	12.500	(+/-)Klórfeniramin	50.000
D-metamfetamin	12.500	Dimenhidrinát	50.000
3,4-metiléndioxietilamfetamin	25.000	Difenhidramin	50.000
Nordoxepin-hidroklorid	25.000	Fenciklidin	50.000
Fenciklidin	5.000	(+)-Klórfeniramin	>100.000

Promazine	8.000	ZOL 50 rokon vegyületek	
Prometazin	25.000	Zolpidem Fenil-4-karbonsav	50
		Zolpidem	>10.000

Keresztreakciót nem okozó vegyületek

A következő anyagok 100 µg/ml koncentrációban nem okoztak keresztreakciót a vizsgálat során.

(-)-Efedrin	Klórfeniramin	Oxálsav
(+)-Naproxen	Kreatin	Penicillin-G
(+/-)-Efedrin	Dextrometorfán	Feniramin
4-Dimetil-amino-antiirin	Dextrorfán-tartarát	Fenotiazin
Paracetamol	Dopamin	L-Fenilefrin
Aceton	Eritromicin	Prokain
Albumin	Etanol	Protonix
Amitriptilin	Furozemid	Pszeduoefedrin
Ampicillin	Glükóz	Kinidin
Aszpartám	Guajakol-gliceril-éter	Ranitidin
Aszpirin	Hemoglobin	Szertralin
Atropin	Ibuprofén	Tiramin
Benzokain	Imipramin	C-vitamin (Aszkorbinsav)
Bilirubin	(+/-)-Izoproterenol	Trimeprazin
b-feniletil-amin	Lidokain	Venlafaxin
Koffein	Metadon	Ibuprofén
Chloroquine	N-metil-efedrin	

IRODALMI HIVATKOZÁSOK

- Baselt RC. *Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man*. 2nd ed. Davis: Biomedical Publications; 1982.
- Hawks RL, Chiang CN, eds. *Urine Testing for Drugs of Abuse*. Rockville: Department of Health and Human Services, National Institute on Drug Abuse; 1986.
- Substance Abuse and Mental Health Services Administration. *Mandatory Guidelines for Federal Workplace Drug Testing Programs*. 53 Federal Register; 1988.
- McBay AJ. *Drug-analysis technology—pitfalls and problems of drug testing*. Clin Chem. 1987 Oct; 33 (11 Suppl): 33B-40B.
- Gilman AG, Goodman LS, Gilman A, eds. *Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics*. 6th ed. New York: Macmillan; 1980.

SZIMBÓLUMJEGYZÉK

	Figyelem, lásd használati utasítást		Tesztkészletenként		Engedélyezett képviselő
	In vitro diagnosztikai használatra		Felhasználható		Ne használja újra
	Tárolás 2-30°C között		Tételszám		Katalógusszám
	Ne használja, amennyiben a csomagolás sérült		Gyártó		Használati útmutató
	CE-jelölés a 98/79/EC IVD orvostechnikai eszközökről szóló irányelv szerint				

GYÁRTÓI INFORMÁCIÓK

Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd.

4. épület, 1418-50. szám, Moganshan Road, Gongshu kerület, Hangzhou, 310011 Zhejiang, Kínai Népköztársaság
contact@diareagent.com

 **Lotus NL B.V.**

Koningin Julianaplein 10, le Verd, 2595AA, Hága, Hollandia
peter@lotusnl.com

Importőr:

Carbon Web Kft.

5600 Békéscsaba, Balassa utca 16., Hungary
+36 30 372 30 86
carbonmedoffice@gmail.com
www.carbonmedical.hu

